

ナザール「鼻ウォッシュ」



sato HEALTHCARE INNOVATION

2006年12月5日作成(第1版)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

手動式生体用洗浄器
JMDNコード：34630000
一般医療機器

届出番号：13B1X0031500001

ナザール「鼻ウォッシュ」

■形状・構造及び原理等

本品は容器にあらかじめ洗浄液を充てんした生体用洗浄器で、手動により洗浄液を噴霧し鼻腔を洗浄します。

●体に接触する部分の組成

〈容器〉低密度ポリエチレン

〈充てん液〉精製水、塩化ナトリウム、ポリソルベート80、香料(フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコール、ポリソルベート20を含有する。)、ベンザルコニウム塩化物

■使用目的、効能又は効果

身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいいます。衛生状態の維持又は治療の一環として用います。手動式です。

■使用方法



〈使用方法にあたっての注意〉

- 容器を横にして使用しますと、洗浄液が霧状になりませんので、かならず上向きにしてお使いください。
- 洗浄する際に洗浄液が鼻腔から流れ落ちますので、衣類等がぬれないように注意してください。
- 使用后、ノズル部分を清潔なガーゼやティッシュペーパーなどでふいてキャップをしめ、清潔に保管してください。
- 噴霧した後、鼻腔内に先端部分を入れたまま押し続けた手の力をぬきますと、鼻水などが容器内に逆に吸い込まれて、液が汚染される原因になりますので注意してください。

★裏面につづく

■使用上の注意

1. 鼻腔内の洗浄のみ使用し、目や耳に使用しないでください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 使用中に万一異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、本品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
4. 耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

〈保管及び取扱い上の注意〉

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)
4. 他の人と共用しないでください。
5. 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

■包装 1個(洗浄液30mL)

■製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

製造販売元 佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

製造元 佐藤製薬株式会社

医療機器製造販売業許可番号 13B1X00315

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記をお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7383
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日を除く)